


USO DE ADAPTADOR ENFIT™ PARA ALIMENTACIÓN A TRAVÉS DE SONDA ABBVIE PEG 20 FR

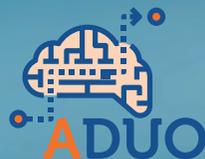

ES-DUOD-210029 Mar21

abbvie



Para alimentación debe usarse siempre la vía gástrica.

01



Se usará un conector de transición **ENFit™** a rosca. (2 partes: Conector y tapón).

02

Se retira el tapón del conector **ENFit™**

03





Se conecta al conector **ENFit™** a rosca, bien a la jeringa **ENFit™** de alimentación de 60 ml, o al sistema de alimentación **ENFit™**.

04 / 05



“ Al finalizar la alimentación, lavar la sonda con **abundante agua** ”



Tapar la vía gástrica bien con el tapón del conector **ENFit™**, o retirando el conector **ENFit™** y cerrar la vía gástrica con su tapón.



06 / 07



Para más información consulte las instrucciones de uso disponibles de "Adaptador ENFit™ to Reverse Luer Transition Connector with cap", "Kit AbbVie PEG/J (15 y 20 FR)".

También puede consultar con su enfermero/a o médico de referencia.

abbvie

