

Use este tapete para organizar los accesorios del equipo de perfusión cuando se prepare para administrar el tratamiento.

Esto puede ayudarle a crear una rutina diaria.

El equipo de perfusión para el tratamiento con Duodopa® Solución para Pefusión que se proporcionará sera

- VYAFUSER™ bomba de perfusión. Es una marca comercial de AbbVie
- West Adaptador del vial. Es una marca comercial de West
- Jeringa B. Braun Omnifix®. Es una marca comercial de B. Braun Medical
- Set de infusión ConvaTec neria™ Guard. Es una marca comercial de ConvaTec

Todas las marcas comerciales, nombres de productos y nombres de empresas o logotipos citados que no sean marcas comerciales de propiedad de AbbVie o con licencia dentro del contenido se utilizan únicamente con fines de identificación y son propiedad de sus respectivos dueños. No se otorga ningún derecho o licencia a AbbVie por implicación o de otro modo para usar marcas comerciales propiedad de terceros.

Para mas información consulte el manual de tratamiento que le han proporcionado.

ES-Levcar-230034 sept23



1 >>> LÁVESE LAS MANOS

Lávese siempre las manos con agua y jabón y séqueselas con una toalla limpia.

No toque nada sucio después de lavarse las manos.



2 >>> PREPARE TODOS LOS ACCESORIOS

Prepare todos los accesorios indicados a continuación. Inspecciónelos para asegurarse que no tienen daños ni están caducados antes de usarlos.

- Vial de medicación.
- Adaptador del vial.
- Jeringa.
- Equipo de perfusión: Tubo de perfusión y dispositivo de inserción.
- Bomba de perfusión.

Para minimizar el riesgo de infección, evite que la punta de los componentes desechables entre en contacto con superficies sucias.

3 >>> REVISE LA SOLUCIÓN DEL VIAL

Si el vial de medicación está refrigerado, saque el vial de la nevera y déjelo a temperatura ambiente protegiéndolo de la luz solar directa durante 30 minutos, antes de su uso. No caliente la solución (en el vial o la jeringa) de ninguna otra manera que no sea dejar que se caliente en temperatura ambiente. Por ejemplo, no caliente en microondas o en agua caliente. No lo use si la solución está turbia o contiene escamas o partículas.




Imagen con fines ilustrativos

4 >>> PREPARE EL VIAL DE SOLUCIÓN

Retire el tapón de plástico del vial.

Limpie la parte superior del vial con una toallita con alcohol y deje secar.

Esto evita la contaminación.

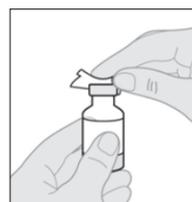

5 >>> CONECTE EL ADAPTADOR DEL VIAL AL VIAL DE SOLUCIÓN

Despegue la cubierta de papel del embalaje del adaptador del vial, pero no lo saque del embalaje protector.

Utilice el embalaje protector para empujar el adaptador del vial firmemente hacia abajo sobre el vial, hasta que encaje en su lugar.

Retire ahora el embalaje del adaptador del vial.



Adaptador del vial



6 >>> PREPARE LA JERINGA

Prepare una jeringa nueva y retire el embalaje.

Si la punta de la jeringa entra en contacto con una superficie sucia, deséchela y coja una nueva.

Presione el émbolo de goma para expulsar completamente todo el aire.

Enrosque la jeringa boca abajo sobre el adaptador del vial.

Coloque la jeringa hacia arriba, recta y con el vial encima y transfiera el contenido completo del vial a la jeringa.

Elimine las burbujas de aire presionando ligeramente el émbolo.

Desenrosque la jeringa del adaptador del vial y coloque la jeringa sobre una superficie limpia.



Jeringa


7 >>> CONECTE EL TUBO A LA JERINGA:

Coloque el final del tubo sobre una toalla de papel limpia.

Conecte el tubo del equipo de perfusión a la jeringa y gírelo hasta que quede apretado.



Tubo de perfusión

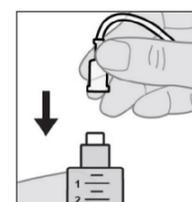

8 >>> PREPARE LA BOMBA

Abra la bomba y coloque la jeringa dentro de la misma.


Quite el protector del extremo del tubo de perfusión y guárdelo.

Cebe el tubo de perfusión siguiendo las instrucciones de la bomba, bombeando la solución de la jeringa a través del tubo hasta que salgan un par de gotas del conector sobre una toalla de papel limpia.

Recuerde reemplazar la batería de la bomba por una completamente cargada cada 24 horas.



Bomba de perfusión

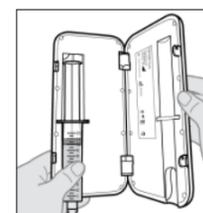

9 >>> INSERTE LA CÁNULA

Elija un sitio de perfusión, limpie la piel con una gasa con alcohol y deje secar.

Prepare el dispositivo de inserción y elimine el papel de la base.

Retire el protector de la cánula de la parte superior y guárdelo.

Utilice el dispositivo de inserción para insertar la cánula en su piel.

Conecte el tubo de perfusión a la cánula. Comience la perfusión con la bomba.

Asegúrese de que la cánula esté correctamente adherida.



Dispositivo de inserción

